



# Portia<sup>®</sup> Ringpessarium

PHARMACY PRODUCTS SINCE 1857



Medisch hulpmiddel voor de behandeling van symptomatische baarmoederverzakking bij vrouwen.

Stevig polyethyleen met een diameter van 50-100 mm en een dikte van 7,5 mm.

Latexvrij, bevat geen metaal. Geen speciale bewaarcondities. Afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

Pessaria worden onder medische begeleiding aangemeten, geplaatst en vervangen. Het pessarium dient na maximaal 6 maanden te worden vervangen door een nieuw exemplaar.

Om de maat te bepalen: meet de afstand tussen de baarmoederhals of het vaginale gewelf en de schaambeenverbinding om de juiste maat van het ringpessarium te bepalen. Bij de Bray Group is een nieuwe Portia-matengids verkrijgbaar.

Voorafgaand aan plaatsing: onderzoek en evalueer de verzakking en vaginale wanden van de patiënt.

Plaatsing: breng het in de vagina aan en plaats het tussen de fornix posterior en de schaambeenverbinding, zodanig dat het niet los zit.

**Mogelijke contra-indicaties** zijn ongemak door de pasvorm, bloedverlies, ulceratie, ontsteking van het bekken, infectie zoals vaginitis (als gevolg van niet-naleving door de patiënt en uitgestelde follow-up).

**Waarschuwingen:** als er symptomen optreden zoals overmatig vaginaal bloedverlies, afscheiding, pijn, irritatie of andere bijwerkingen waarover u zich zorgen maakt, neem dan contact op met degene die het pessarium heeft geplaatst, met een andere arts of met de fabrikant. Een pessarium kan stressincontinentie verergeren of juist aan het licht brengen.

**Complicaties** kunnen zich voordoen wanneer het vervangen van het pessarium wordt uitgesteld of de patiënt zelf het pessarium gebruikt zonder toezicht van een arts.



Digitale gebruiksaanwijzingen, video's en vertalingen zijn te vinden op:  
[www.portiapessaries.com](http://www.portiapessaries.com)



Mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str. 71,  
D-30855  
Langenhagen



Bray Group Ltd  
1-5 Regal Way  
Faringdon SN7 7BX  
United Kingdom  
+44 (0) 1367 240736

