



Portia[®] Ringpessararium

PHARMACY PRODUCTS SINCE 1857



Medisch hulpmiddel voor de behandeling van symptomatische baarmoederverzakking bij vrouwen.

Flexibele polyvinylchloride (PVC) met een diameter van 50-110 mm en een dikte van 12,5 mm.

Latexvrij, bevat geen metaal. Geen speciale bewaarcondities.

Niet verbranden, afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

Pessaria worden onder medische begeleiding aangemeten, geplaatst en vervangen.

Het pessarium dient na maximaal 6 maanden te worden vervangen door een nieuw exemplaar.

Om de maat te bepalen: meet de afstand tussen de baarmoederhals of het vaginale gewelf en de schaambeenvverbinding om de juiste maat van het ringpessararium te bepalen. Bij de Bray Group is een nieuwe Portia-matengids verkrijgbaar.

Voorafgaand aan plaatsing: onderzoek en evalueer de verzakking en vaginale wanden van de patiënt.

Plaatsing: druk het pessarium in een ovale vorm en breng het in de vagina aan en plaats het tussen de fornix posterior en de schaambeenvverbinding, zodanig dat het niet los zit.

Mogelijke contra-indicaties zijn ongemak door de pasvorm, bloedverlies, ulceratie, ontsteking van het bekken, infectie zoals vaginitis (als gevolg van niet-naleving door de patiënt en uitgestelde follow-up).

Waarschuwingen: als er symptomen optreden zoals overmatig vaginaal bloedverlies, afscheiding, pijn, irritatie of andere bijwerkingen waarover u zich zorgen maakt, neem dan contact op met degene die het pessarium heeft geplaatst, met een andere arts of met de fabrikant. Een pessarium kan stressincontinentie verergeren of juist aan het licht brengen.

Complicaties kunnen zich voordoen wanneer het vervangen van het pessarium wordt uitgesteld of de patiënt zelf het pessarium gebruikt zonder toezicht van een arts.



Digitale gebruiksaanwijzingen, video's en vertalingen zijn te vinden op:
www.portiapessaries.com



Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855
Langenhagen



Bray Group Ltd
1-5 Regal Way
Faringdon SN7 7BX
United Kingdom
+44 (0) 1367 240736